



GET IT ON!

Show your colors.

www.oncondoms.com

GUÍA DE PRESERVATIVOS

Tu guía de estilo para vestir tu erección a medida




PURO LUJO, SIN ADORNOS

SENSACIÓN INTENSA, CALIDAD Y SEGURIDAD

**JUSTO - NATURAL
SOSTENIBLE - INDIVIDUAL**

Látex natural de primera calidad procedente de una iniciativa agroforestal justa y regenerativa.

Los preservativos ONSIZE son suaves como la seda, transparentes, huelen bien y se prueban electrónicamente de forma individual. Con depósito, lubricados y disponibles en 8 anchos diferentes.

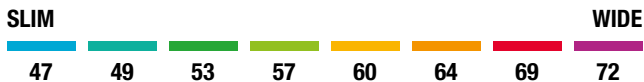

NOTA: Para una primera recomendación de ancho de ONSIZE, es crucial la circunferencia del pene, no la longitud del pene.

IMPORTANTE: Puedes jugar con las diferentes anchuras según cómo te sientas. Es importante que el preservativo no se deslice, se salga o esté demasiado apretado.

!!! INFORMACIÓN IMPORTANTE: Al imprimir, selecciona „SIN ajuste de página“. De lo contrario, la cinta métrica no se imprimirá a escala. Lo mejor es descargar el archivo e imprimirlo con Adobe Acrobat SIN ajuste de página.

PÓNTELO - en 3 pasos:

01. Recorta la cinta métrica ONSIZE a lo largo de la línea de puntos.


02. Coloca la cinta métrica cuidadosamente alrededor de la parte más ancha del pene erecto. Puedes leer el ancho recomendado en la flecha.

¡ATENCIÓN: Al recortar pueden formarse bordes afilados de papel!

03. Ahora tienes una primera recomendación, juega con los tamaños alrededor de este ancho:

Ahora depende de tu sensación y de tus preferencias.

Te sentirás más seguro y mejor que nunca.

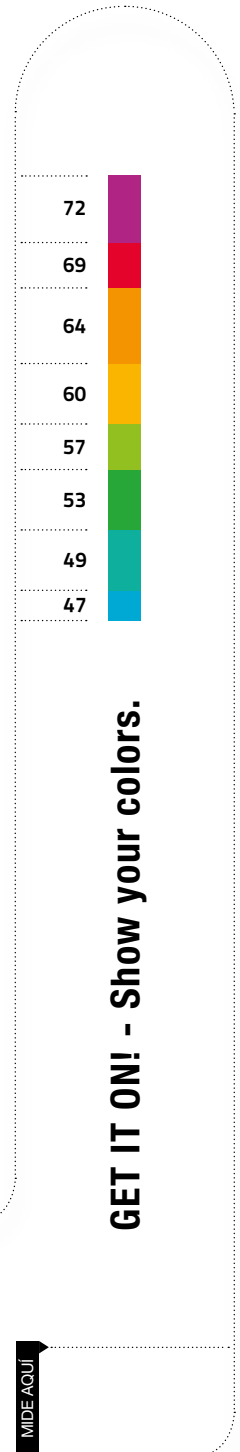

MIDE AQUÍ

Para más información: www.oncondoms.com & www.regenerativerubber.org