

Desinfektions- und Hygieneplan

Datum: _____

- EH
- BS
- LK
- BH
- _____



gemäß DGUV Grundsatz 2.3.3 304-001, 304-002 und 304-003

Desinfizieren darf nur wer in den Hygieneplan eingewiesen ist. Die Einhaltung ist obligat. Veränderungen ohne Genehmigung sind nicht gestattet. Die Desinfektion durch einen Kurshelfer unterliegt der Verantwortung der Lehrkraft.

Name der ermächtigten Stelle: Personal Paramedic

Kennziffer: 8.2018

Verantwortliche Person für das Hygienemanagement: Ruben Wippermann

Version 2, erstellt am 27.10.2025

Verwendet?	Was? (Material)	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?	Anmerkung	Unterschrift
	HLW - Übungsgerät a) Oberflächen b) Luftwege c) Gesichtsmasken	Ende des Kurses	a) Wischdesinfektion b) Ausbauen aus dem Übungsgerät zur Wiederbelebung c) TWINSKIN Masken entsorgen, Trägermasken gemäß Seite 2 wieder aufbereiten	a) Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Übungslungen	Ende des Kurses	Auswechseln		<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Übungsmatte	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Integralhelm für Motorradfahrende	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Übungsmaterial a) Verbandkasten b) Verbrauchsmaterial Verbände/ Dreieckstücher c) Übungsdecken aus Stoff	Ende des Kurses	a) Wischdesinfektion b) Entsorgen c) Waschdesinfektion	a) Bode Bacillol Tissues Desinfektions- tücher c) schülke+ perform	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	AED - Demonstrations-/ Trainingsgerät	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Warnweste	Ende des Kurses	Waschdesinfektion	schülke+ perform	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Warndreieck	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Heimlichhandgrifftrainer	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Immobilisation	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
	Intubation, i.V. Zugang, Infusion	Ende des Kurses	Wischdesinfektion, Verbrauchsmaterial entsorgen	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
					<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		
					<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer		

Desinfektion der Gesichtsmasken

Datum: _____

Boxennummer und Anzahl	Beginn (Datum und Uhrzeit)	Ende (Datum und Uhrzeit)	Name und Unterschrift

Desinfizieren darf nur wer in den Hygieneplan eingewiesen ist. Die Einhaltung ist obligat. Veränderungen ohne Genehmigung sind nicht gestattet.
 Nach der Desinfektion kommen die Masken (21 Stück pro Box) getrennt vom Zahnstück in die durch Wincodesinfektion (Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher) desinfizierte Box und werden verschlossen. Die Box wird oben versiegelt und mit dem Desinfektionsdatum beschriftet.
 Alternativ zur Waschmaschine ist die Reinigung in der Spülmaschine gestattet. Die Sicherheitshinweise und Handlungsabfolge liegen im Desinfektionsbereich aus und können im Büro angefordert werden.
 Das Hygienekonzept wird jährlich an die neuesten Standarts angepasst und bei Veränderungen der DGUV zur Abnahme vorgelegt.

Registriernummer: _____

Name Lehrkraft: _____

Unterschrift
 Lehrkraft: _____

Sicherheits-
bestimmungen:



Durchführung:



Desinfektionsmittel:
 schülke+ perform
 Pulverförmiges Konzentrat
 zur Desinfektion und
 Reinigung von
 Medizinprodukten und
 Flächen auf Basis von
 Aktiv-Sauerstoff.