

Desinfektions- und Hygieneplan



gemäß DGUV Grundsatz 2.3.3 304-001, 304-002 und 304-003

Desinfizieren darf nur wer in den Hygieneplan eingewiesen ist. Die Einhaltung ist obligat. Veränderungen ohne Genehmigung sind nicht gestattet. Die Desinfektion durch einen Kurshelfer unterliegt der Verantwortung der Lehrkraft.

- EH
- BS
- LK
- BH
- _____

Verwendet?	Was? (Material)	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?	Anmerkung
	HLW - Übungsgerät	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Gesichtsmasken	Ende des Kurses	Abwerfen und neue Box bereitstellen		<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Übungslungen	Ende des Kurses	Auswechseln		<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Übungsmatte	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Helm	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Verbandsmaterial	Ende des Kurses	Entsorgen		<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	AED	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Verbandskasten, Warndreieck, Warnweste	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Heimlichhandgrifftrainer	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Immobilisation	Ende des Kurses	Wischdesinfektion	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
	Intubation, i.V. Zugang, Infusion	Ende des Kurses	Wischdesinfektion, Verbrauchsmaterial entsorgen	Bode Bacillol Tissues Desinfektionstücher	<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
					<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	
					<input type="radio"/> Lehrkraft <input type="radio"/> Kurshelfer	

Desinfektion der Gesichtsmasken

Boxennummer und Anzahl	Beginn (Datum und Uhrzeit)	Ende (Datum und Uhrzeit)	Name und Unterschrift

Desinfizieren darf nur wer in den Hygieneplan eingewiesen ist. Die Einhaltung ist obligat. Veränderungen ohne Genehmigung sind nicht gestattet.
 Nach der Desinfektion kommen die Masken (21 Stück) getrennt vom Zahnstück in die durch Winschdesinfektion (Bode BacilloI Tissues Desinfektionstücher) desinfizierte Box und werden verschlossen. Die Box wird an beiden Stellen versiegelt und mit dem Desinfektionsdatum beschriftet.
 Alternativ zur Waschmaschine ist die Reinigung in der Spülmaschine gestattet. Die Sicherheitshinweise und Handlungsabfolge liegen im Desinfektionsbereich aus und können im Büro angefordert werden.

Registriernummer: _____

Datum: _____

Name Lehrkraft: _____

Unterschrift
 Lehrkraft: _____

Sicherheits-
bestimmungen:



Durchführung:



Desinfektionsmittel:
 schülke+ perform
 Pulverförmiges Konzentrat
 zur Desinfektion und
 Reinigung von
 Medizinprodukten und
 Flächen auf Basis von
 Aktiv-Sauerstoff.